



Das Hugly – angeleitet vom Englischen to hug = umarmen – ist ein Multifunktions-Kissen (MFK) mit der Grösse von 60 x 30 cm. Durch die gekrümmte Form ist das Kissen sehr handlich und eignet sich für die gezielte Unterstützung überall am Körper. Es ist mit lockerem, elastischem aber druckstabilem Material gefüllt. Die Füllung VarioPerl aus expandierten Polypropylen (EPP)-Polsterperlen und Polyuretan (PU)-Schaumstoff ist leicht form- und anschmiegar, unter Druck wird sie dagegen formstabil.

Anwendungsbeispiele mit dem MFK Midi 060

Dieses Kissen kann sehr vielfältig in vielen Unterstützungssituationen eingesetzt werden. Folgend einige Beispiele.



Kopf- und Nackenstütze

Der Nacken ist gut unterstützt, beim Drehen des Kopfes ist beidseitig ein Kissen um darauf das Gewicht des Kopfes abzugeben. Diese Position hilft den Kopf zu strecken.



Kopfstütze in der Seitenlage



Variante 1: Kopf, Hand und zT. Unterarm erhalten eine angepasste Auflagefläche.
Variante 2: Die unten liegende Schulter erhält Entlastung durch das Kissen, das Schulterblatt ist gestützt.



Unterstützung der Arme

Variante 1: Der ganze Arm ist unterstützt und die Hand hat eine volle Auflagefläche. Das Schulterblatt selber bleibt frei. Die Hand und der Unterarm sind leicht erhöht, damit der Lymphabfluss unterstützt wird.

Variante 2: Als Auflagefläche für die Unterarme und Hände, vorallem zum Lesen. Das Gewicht des Buches und der Arme wird vom Kissen aufgefangen und ermöglicht auch Personen mit wenig Kraft ein entspanntes Lesen.

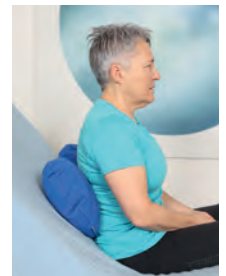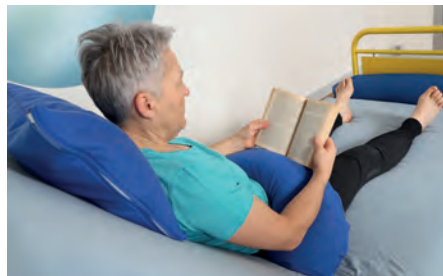

Unterstützung beim Sitzen im Bett

Das Kissen unterstützt den Brustkorb, sodass die Schulterblätter frei und beweglich sind.



Unterstützung der Beine

Variante 1: Das Kissen zwischen den Beinen hilft die Spannung im ganzen Bein zu senken.

Variante 2: Auch umgekehrt angelegt, hilft das Kissen den Druck an Knie und Knöchel zu verteilen. In dieser Weise angelegt, unterstützt das Kissen auch die Wade.

Freipositionierung der Ferse



Unterstützung beim Sitzen im Rollstuhl

Variante 1: Beim Sitzen auf dem Stuhl oder im Rollstuhl können die Arme auf das Kissen im Schoß abgelegt werden. So kann sich die unterstützte Person mit weniger Anstrengung mit den Armen die aufrechte Position gestalten.

Variante 2: Zum Ausgleich des runden Bogens der Rollstuhllehne. Die unterstützte Person kann so besser aufrecht sitzen.

Variante 3: Durch die Form des Kissens kann es bei der Positionierung der Arme stufenlos nach vorne und hinten geschoben werden, je nach Bedarf.

Bezüge

Doppel-Jersey

Die Bezüge sind aus 100% langstapiger Baumwolle (205 gr/m²) mit Reißverschluss. Die Standardfarbe ist Königsblau. Weitere Farben auf Anfrage.

Inkontinenz

Der Inkontinenz-Bezug mit Reißverschluss besteht aus einem PU-beschichteten Gewebe und ist MRSA-dicht.

Pflegehinweis

Roller und Kissen



Doppel-Jersey-Bezüge



Inkontinenz-Bezüge



Abwischbar mit üblichen Desinfizientien

Ausführliche Hinweise zur Pflege und allgemeiner Handhabung finden Sie unter:

www.bewegtes-lagern.com/uebersicht